
LOLLI SPONGE FÜR KINDERGÄRTEN

ANLEITUNG

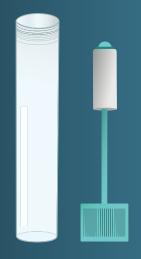



PCR Testung

- >> SICHER
- >> SCHMERZFREI
- >> KINDGERECHT


LOLLISPONGE. PCR-KINDERGARTENTESTUNGEN test.zmdx.at



LOLLI SPONGE

PCR Test Kit

- 1 Kunststoffröhrchen mit LolliSponge an Verschlussdeckel
- 2 Kochsalzlösung-Ampulle
- 3 Retourbeutel
- Anleitung mit Probennummer
- 5 Zellstoff

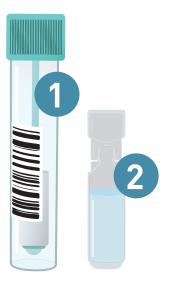





WebApp Portal



Registrierungsportal:

QR-Code scannen oder zum Link: test.zmdx.at








LOLLISPONGE. PCR-KINDERGARTENTESTUNGEN test.zmdx.at




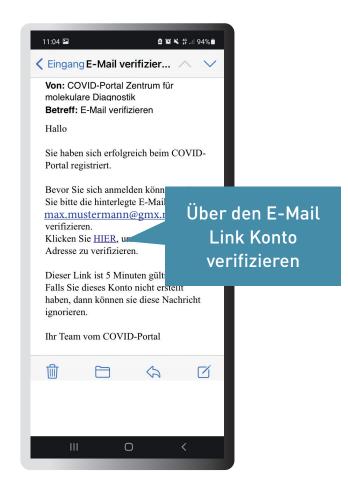








LOLLISPONGE. PCR-KINDERGARTENTESTUNGEN test.zmdx.at

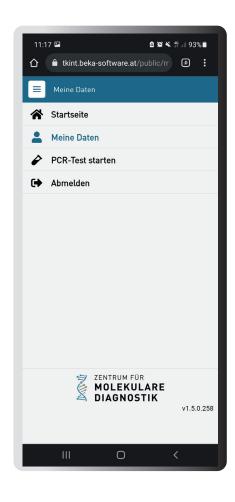


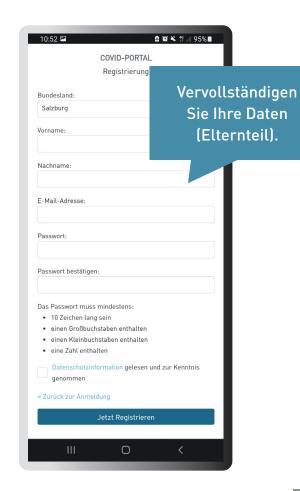


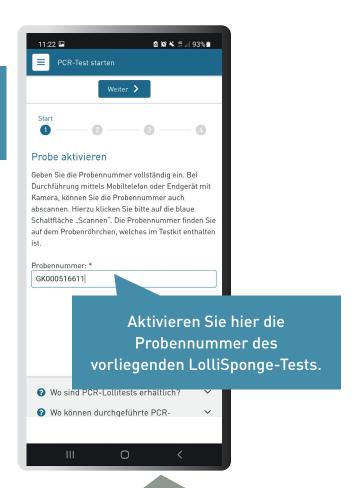


Hinweis: Um weitere Testpersonen zu registrieren, starten Sie diesen Prozess neu.

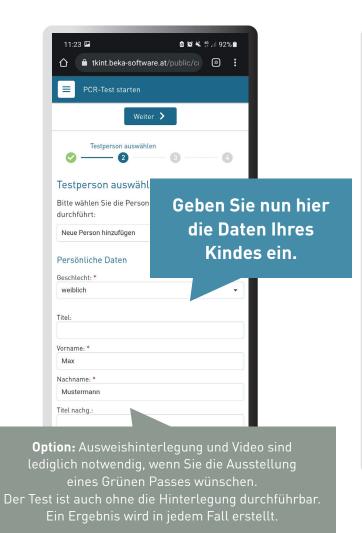

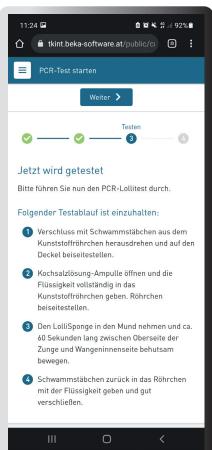

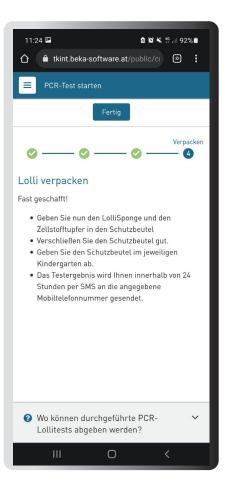

Anleitung Testung

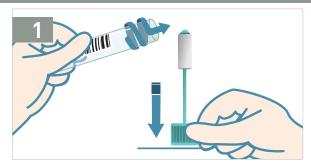

1. Verschluss mit Schwammstäbchen aus dem Kunststoffröhrchen herausdrehen und auf den Deckel beiseite stellen. Darauf achten, dass das Schwammstäbchen keine Flächen berührt.



4. Die Vorrichtung ca. 60 Sekunden lang behutsam im Mund bewegen. Oberseite der Zunge und Wangeninnenseite.



2. Kochsalzlösung-Ampulle öffnen und diese Flüssigkeit vollständig in das Kunststoffröhrchen geben. Röhrchen beiseite stellen.



5. Schwammstäbchen zurück in das Röhrchen mit der Flüssigkeit geben und gut verschließen.



3. Das Schwammstäbchen in den Mund einführen. Keine Oberflächen oder andere Körperteile als die Mundinnenseite berühren.



6. Etikettierte Probe und Zellstoff in den Retourbeutel geben und zur Auswertung abgeben. Gebrauchsanleitung aufbewahren.